

DiaMed Journal

Genossenschaft für Leistungen im Bereich der
Diabetes- und Stoffwechselheilkunde eG

DiaMed

in Kooperation mit

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS


Einkaufsaktion zu Sicherheits-Lanzetten von Ypsomed

Sicherheits-Lanzetten zur Kapillarblut-Entnahme

Wie Sie sicherlich wissen, gilt seit Mitte 2013 in Deutschland die Biostoff-Verordnung. Diese regelt den Umgang mit Biostoffen, zu denen selbstverständlich auch Blut und andere Körperflüssigkeiten zählen. In erster Linie dient die BioStoffV dem Arbeitnehmerschutz und deshalb verpflichtet sie den Arbeitgeber u.a. „...scharfe oder spitze medizinische Instrumente...durch solche zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen besteht...“.

Damit Sie die Anforderungen der BioStoffV erfüllen können, hat die DiaMed eG mit der Ypsomed GmbH ein Angebot für Sicherheits-Lanzetten verhandelt. Und zwar zu einem äußerst attraktiven Preis: so kostet im günstigsten Fall eine Packung mit 200 Stk. nur 12,76 Euro zzgl. MwSt. (abzgl. ggfs 1,5% Skonto). Gegenüber dem Listenpreis bedeutet das eine Einsparung von knapp 50%.

Lesen Sie mehr über die Biostoff-Verordnung und über die Sicherheits-Lanzetten von Ypsomed auf den folgenden Seiten. Mit dem Bestellformular auf der Rückseite können Sie dieses Angebot einfach und schnell nutzen.

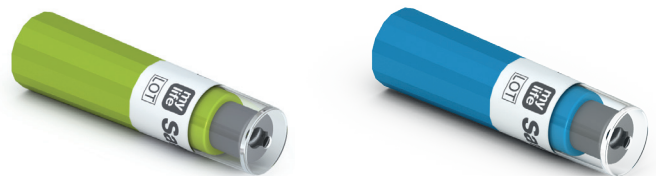

6 bis 7 Cent pro Lanzette

Sicherheits-Lanzetten der Ypsomed GmbH

- ✓ entsprechen der Biostoff-Verordnung
- ✓ sind sehr preisgünstig (6-7 Cent pro Lanzette)
- ✓ lassen sich sofort nach Abnahme der Schutzkappe einsetzen (keine weiteren Arbeitsschritte!)
- ✓ stechen schnell und minimieren damit den Schmerz, **höchster Patientenkomfort mit den neuen mylife SafetyLancets Comfort**
- ✓ höchste Nadelqualität

Sicherheit hat Vorrang

Eine Zusammenfassung der aktuellen Biostoff-Verordnung (BioStoffV) von 2013

Seit Mitte 2013 ist die BioStoffV in Kraft und damit sind erhöhte Anforderungen an den Arbeitsschutz insbesondere in Krankenhäusern, Praxen und Laboratorien verbunden.

Generell regelt die BioStoffV den Umgang mit Biostoffen und soll die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, die mit Biostoffen umgehen, gewährleisten. Blut und andere Körperflüssigkeiten zählen zu den Biostoffen. Wesentlicher Inhalt der BioStoffV ist die Gefährdungsbeurteilung, die der Arbeitgeber – also der Praxisinhaber – zu erstellen hat. Bei den Biostoffen wird zwischen vier Risikogruppen unterschieden. Aus der Einstufung in die Risikogruppen resultieren die notwendigen Schutzmaßnahmen.

Diabetologische Praxen werden in der Regel mit Biostoffen der Risikogruppen 1 und 2 (ggfs. auch 3) umgehen. Die hier umzusetzenden Schutzmaßnahmen sind u.a.:

- ✓ Hygienemaßnahmen, die dem allgemeinen Stand der Wissenschaft entsprechen
- ✓ Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so zu gestalten oder auszuwählen, dass die Exposition der Beschäftigten gegenüber Biostoffen und die Gefahr durch Stich- und Schnittverletzungen verhindert oder minimiert werden, soweit dies technisch möglich ist
- ✓ Maßnahmen zur sicheren und sachgerechten Entsorgung von Biostoffen bzw. kontaminierten Gegenständen

Auf weitere geforderte Schutzmaßnahmen wird an dieser Stelle aus Platzgründen nicht eingegangen, diese können unter http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/biostoffv_2013/gesamt.pdf nachgelesen werden.

Weiterhin beinhaltet die BioStoffV eine Pflicht zur umfangreichen Dokumentation insbesondere von Nadelstichverletzungen.

BioStoffV, § 11

...

Absatz 2

Der Arbeitgeber hat entsprechend § 9 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 spitze und scharfe medizinische Instrumente vor Aufnahme der Tätigkeit durch solche zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen besteht, soweit dies technisch möglich und zur Vermeidung einer Infektionsgefährdung erforderlich ist.

In der Konsequenz führt die BioStoffV u.a. dazu, dass die Arbeitgeber in Zukunft:

- ✓ den unnötigen Gebrauch spitzer bzw. scharfer Gegenstände einschränken
- ✓ sichere Instrumente, also Instrumente mit Nadelschutzmechanismus bereitstellen
- ✓ sichere Verfahren für den Umgang und die Entsorgung scharfer bzw. spitzer Instrumente und Abfälle festlegen müssen.

Durch die Biostoff-Verordnung ist die Nichtverwendung von Sicherheitsprodukten eine Ordnungswidrigkeit, die mit empfindlichen Bußgeldern belegt werden kann. Ordnungswidrig handelt heute, wer entgegen §11(2) BioStoffV ein dort genanntes Instrument, bei dem die Gefahr einer Stich- oder Schnittverletzung besteht, nicht oder nicht rechtzeitig durch ein geeignetes "sicheres Instrument" ersetzt (§20(1) BioStoffV). Wer durch eine derartige vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, macht sich nach §26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes sogar strafbar.

Impressum

Herausgeber: DiaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Diabetes- und Stoffwechselheilkunde eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25 89522 Heidenheim • Tel.: 07321 9469190 • Fax: 07321 9469140 • mail@bvnd.de • www.bvnd.de • Vorstand: Dr. Thomas Scholz, Dr. Gerhard Klausmann, Frank Wallbrecht • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Nikolaus Scheper • Bankverbindung: Kreissparkasse Heidenheim • BLZ 632 500 30 • Konto 46032465 • IBAN: DE76 6325 0030 0046 0324 65 • BIC: SOLADE51HDH Register: Genossenschaftsregister Ulm: GnR 720081 • Ust-IdNr.: DE293378337 • Steuernr.: 64104/00781 • Bildnachweise: Ypsomed GmbH

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DiaMed eG meine Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DiaMed eG meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DiaMed eG finde ich auf der Homepage unter www.diamed-eg.de.

mylife™ SafetyLancets und mylife™ SafetyLancets Comfort

Zur Minimierung des Risikos versehentlicher Stichverletzungen

Das innovative patentierte Design macht die Entnahme kapillarer Blutproben einfach und sicher. Die Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe garantieren höchste Sicherheit und schützen das Pflegepersonal wie auch Patienten vor Stichverletzungen und den damit verbundenen Risiken.






Sicherheitsfunktionen

- ✓ Die Sicherheitsversiegelung garantiert, dass die mylife™ SafetyLancets noch unbenutzt sind
- ✓ Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontaminierung vor dem Gebrauch
- ✓ Die vor und nach Gebrauch sicher verborgene Nadel minimiert versehentliche Stichverletzungen
- ✓ Durch die Einmal-Auslösefunktion kann die Lanzette kein zweites Mal verwendet werden
- ✓ Entspricht der Biostoff-Verordnung

Komfortfunktionen


- ✓ Der Einstich mit hoher Geschwindigkeit minimiert den Schmerz
- ✓ Höchste Nadelqualität (dreifach angeschrägte Nadelspitze) garantiert optimalen Blutfluss bei maximalem Komfort
- ✓ Kein Laden oder Zusammensetzen vor Gebrauch erforderlich

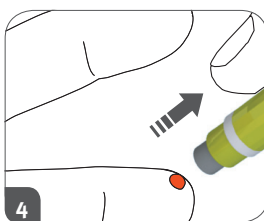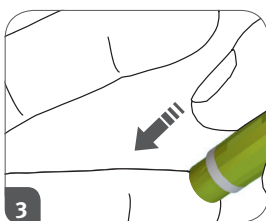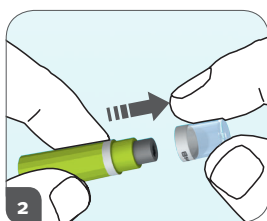

1. Erhältlich in Packungen zu je 100 oder 200 Stück mit praktischem Schiebedeckel
2. Drehen Sie einfach die Schutzkappe und ziehen Sie diese von der mylife™ SafetyLancets ab.
3. Setzen Sie die mylife™ SafetyLancet auf den Finger auf. Drücken Sie die Lanzette fest gegen die gewählte Einstichstelle, um den Lanzettenmechanismus auszulösen.
4. Die Nadel zieht sich sofort nach Gebrauch wieder zurück. Dank der Einmal-Auslösefunktion kann die mylife™ SafetyLancet nicht versehentlich ein zweites Mal benutzt werden.
5. Entsorgen Sie die mylife™ SafetyLancet gemäß der vor Ort geltenden Vorschriften.

mylife™ Clickfine® AutoProtect Sicherheitspennadeln

Auch für Sie entsprechend der Biostoff-Verordnung verfügbar:

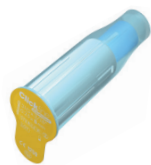

mylife™ Clickfine® AutoProtect - die Sicherheitspennadel in 5 mm und 8 mm für den Klinik- und Pflegebereich. Mit automatischer Verriegelung unmittelbar nach der Injektion.

 Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.

Bestellformular – Faxantwort Fax Nr. 07321 9469140

Das folgende Angebot gilt ausschließlich für die Mitglieder des BVND und/oder der DiaMed eG.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken Sie es per Post oder Fax an:

DiaMed eG Geschäftsstelle, c/o med info GmbH, Hainenbachstraße 25, 89522 Heidenheim

Artikel	Artikelnr.	PZN	Listenpreis	BVND-Preis	DiaMed eG Preis	Bestellmenge
mylife™ SafetyLancets Comfort (100 Stück/Packung) ab 1 Packung* ab 5 Packungen* ab 10 Packungen*	 700009361	12900430	11,60 EUR	9,47 EUR 8,34 EUR 7,14 EUR	7,37 EUR 7,16 EUR 6,65 EUR	_____ _____ _____
mylife™ SafetyLancets Comfort (200 Stück/Packung) ab 1 Packung* ab 5 Packungen* ab 10 Packungen*	 700001495	11286117	22,25 EUR	18,17 EUR 16,01 EUR 13,69 EUR	14,13 EUR 13,74 EUR 12,76 EUR	_____ _____ _____
mylife™ SafetyLancets (100 Stück/Packung) ab 1 Packung* ab 5 Packungen* ab 10 Packungen	 700009359	12900424	11,60 EUR	9,47 EUR 8,34 EUR 7,14 EUR	7,37 EUR 7,16 EUR 6,65 EUR	_____ _____ _____
mylife™ SafetyLancets (200 Stück/Packung) ab 1 Packung* ab 5 Packungen* ab 10 Packungen	 7100031	09123827	22,25 EUR	18,17 EUR 16,01 EUR 13,69 EUR	14,13 EUR 13,74 EUR 12,76 EUR	_____ _____ _____

* pro Bestellung

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von 50,- EUR; Zahlungsbedingungen: 10 Tage = 1,5 % Skonto; 30 Tage = netto; Vertragspartner ist die Ypsomed GmbH, Höchster Straße 70, 65835 Liederbach; AGB unter: www.ypsomed.de

Für Patientenschulungen bieten wir Ihnen auch kaum spürbare, da 6-fach geschliffene Insulin-Pen-Nadeln an:	PZN 100 Stück	Kostenlose Muster
mylife Clickfine 32 G/4 mm	01222501	☐
mylife Clickfine 31 G/5 mm	13331721	☐
mylife Clickfine 31 G/6 mm	05524133	☐
mylife Clickfine 31 G/8 mm	05524156	☐
Sicherheitsprodukte entsprechend der Biostoff-Verordnung für die Fremdinjektion durch Praxis- und Pflegepersonal:	PZN 100 Stück	
mylife Clickfine AutoProtect Sicherheitspennadeln, 31 G/5 mm	11195372	☐
mylife Clickfine AutoProtect Sicherheitspennadeln, 29 G/8 mm	06426562	☐

- ☐ Ich bin Mitglied des Bundesverbandes Niedergelassener Diabetologen (BVND).
- ☐ Ich möchte Mitglied des BVND werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.
- ☐ Ich bin Mitglied der DiaMed eG.
- ☐ Ich möchte Mitglied der DiaMed eG werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

Titel, Vorname, Name

Praxisanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefonnummer

Faxnummer

Datum, Unterschrift

Praxisstempel